

FebriDx[®]

Bakterielle versus virale Infektion

Pieks und Aha in 10 Minuten aus nur 5 µl Kapillarblut!

IDEAL
AUCH FÜR DIE
NOTAUFNAHME



Super einfach in der Handhabung –
ganz ohne zusätzliches Equipment


 **bestbion**^{dx}



FebriDx[®]

In nur 10 Minuten mit Sicherheit wissen,
ob Sie Antibiotika geben müssen – **oder nicht**

- ✓ **Zuverlässigster Test seiner Art:** Gleichzeitiger Nachweis von MxA und CRP
- ✓ **Duale Biomarker Technologie:** Optimiert Sensitivität und Spezifität beider Marker, MxA und CRP
- ✓ **Alles in einem:** Lanzette, Blutentnahme-/Transferröhrchen und Puffer – kein zusätzliches Equipment nötig
- ✓ **Super einfach:** In den Finger pieksen, Blut aufnehmen, Bügel umlegen, Puffer-Knopf drücken
- ✓ **Super schnell:** Zuverlässiges Ergebnis in nur 10 Minuten
- ✓ **Einfaches Ablesen:** Eindeutiges Ergebnis ohne Interpretationsspielraum
- ✓ **Für Kinder ab 2 Jahren** geeignet
- ✓ **Super praktisch:** Dank Testspender-Box immer griffbereit
- ✓ **Antibiotic Stewardship:** Verhindert die Resistenzausbreitung dank Vermeidung unnötiger Antibiotikagabe

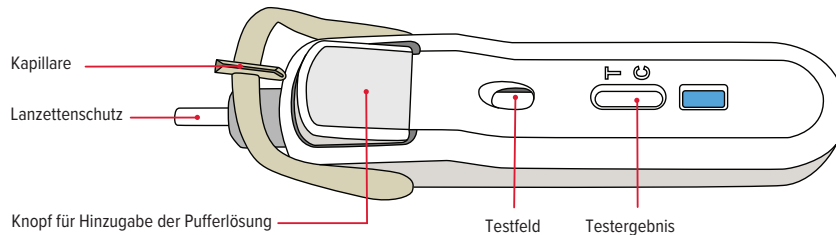


MxA: Was ist das?

Empfindlicher und spezifischer Marker für Virusinfektionen

- > Intrazelluläres Protein, welches durch seine antivirale Aktivität bei einer akuten viralen Infektion ansteigt
- > MxA-Werte bleiben ausschließlich negativ bei bakteriellen Infektionen
- > Bereits 1-2 Stunden nach Infektion nachweisbar




So einfach funktioniert's:

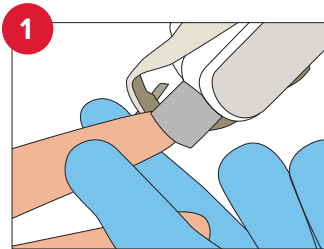

1 In den Finger stechen


Lanzettenschutz abnehmen und mit der Lanzette in den Finger pieksen.

Den ersten Blutstropfen abwischen.

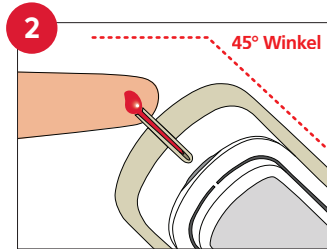

2 Blutprobe aufnehmen


Mit der Kapillare Blut aufnehmen bis die Kapillare komplett gefüllt ist.

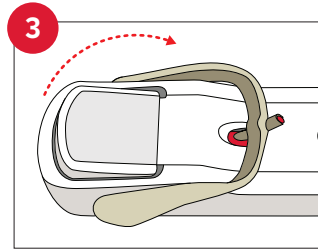

3 Blutprobe übertragen

Den Bügel umlegen, um das Blut auf das Testfeld zu übertragen.

Etwa 30 Sekunden warten.

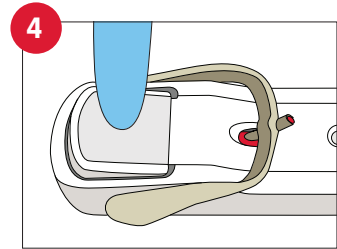


4 Pufferlösung hinzufügen

Den Knopf drücken, um den Puffer einfließen zu lassen.

Nach 10 Minuten das Ergebnis ablesen.

So einfach lesen Sie die Ergebnisse ab:

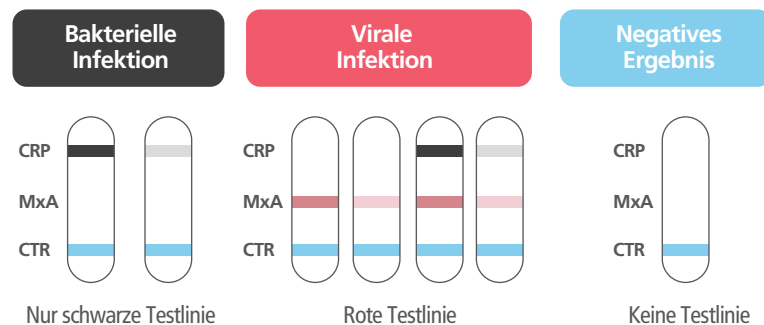

SCHON GEWUSST?

Mehr als 90 % der Patienten, die mit akutem Husten vorstellig werden, leiden an einer Viruserkrankung.

Neugierig? Mehr Infos und ein kostenloses Muster erhalten Sie hier: www.bestbion.com/febridx



Noch Fragen?

Rufen Sie uns an unter:
+49 2234 987 95 60

oder schreiben Sie an:
produktmanagement@bestbion.com

**Wir sind
zertifiziert:**

